

Operating Manual

操作手冊

PVC 塑膠氣囊氣墊座



TS-V06-4040 / TS-V06-4540

衛部醫器輸壹字第 014760 號

“淳碩” 浮動坐墊 (未滅菌)

“TRUE SOURCE” Flotation Cushion (Non-Sterile)

目 錄

注意事項	3
坐墊特點	4
使用重點	4
設置說明	5
座墊圖示	5
產品內容物	5
舒適度設定	6
清潔與洗滌說明	7
簡易修復	8
如何修補	8
儲存方式	8
基本規格	9
保固期	9
補助-保固書	10
保固卡	11



注意事項

- 1.避免尖銳物品刺穿坐墊本體。
- 2.產品應保持乾燥,避免久浸液體造成材質產生不良變化。
- 3.請避免曝曬於陽光下及機器烘乾。
- 4.請避免在高溫.油.煙及易燃或有毒氣體環境下使用。
- 5.正常使用時其充氣閥應保持密閉。
- 6.請勿在充洩閥作拉扯動作,避免過度受力造成損壞。
- 7.座墊本體及座墊保護罩應常保持乾淨。
- 8.為患者本身所使用的坐墊,除非滅菌消毒完整,建議不要轉作他人使用,避免交叉感染之堪虞。
- 9.本產品不適合用於高溫消毒。
- 10.本產品若已接觸到人體使用,為避免交叉感染,使用後不得退換貨。
- 11.使用者需符合環保法規方式報廢醫療用品。不可燃燒及隨意丟棄。
- 12.此產品不適用於麻醉程序(NO AP/APG).只勝任在一般狀況下使用。

醫療器材分類為第一等級

醫材分類分級代碼:O.3175

浮動坐墊是醫用器材，由塑膠，橡皮或其他種類製成之外膜，可填裝水、空氣、凝膠、泥狀物或其他可作為漂浮介質，使用於座位上以減少皮膚潰瘍的機率。

【坐墊特點】

- 1.氣囊數量為 64 及 72 個或更多,顆數多而密集,讓接觸表面積增加,使壓力分散及減壓能力大為提升,舒適及穩定程度明顯卓越。
- 2.特殊獨立氣囊外型設計,使氣流道增加益於空氣流動降低熱流,讓臀部清爽不聚熱。
- 3.擺置方式可依照需求使其左右方式或為前後方式作分區。
最大載重 130Kg。
- 4.坐墊成型採高週波壓合方式,壽命及耐用度增加。
- 5.座墊保護罩其上層採用透氣四向高級彈性 Nylon 布.適形性佳,服貼臀形可降低使用時的剪力產生。
下層則為防滑防水阻燃 PU 貼合層。
- 6.手持打氣筒操作簡單且不費力。

【使用重點】


在預防壓瘡或褥瘡的發展第一步：需於每兩小時內或遵從醫生規定時間內要改變襯墊本體的壓力點。

而當坐在此座墊時,重要的是要能常常自行上下撑起,或者儘可能固定時間多次被抬起,可以避免骨突處附近部位持續被壓迫。

【設置說明】

- 1.座墊保護罩套好在座墊上,注意有兩端缺口處為充洩閥出口。
- 2.將座墊置於座椅或輪椅上。
- 3.打開充洩閥及使用手持打氣筒對著座墊進行充氣。
- 4.座墊可獨立分別調節雙氣室以增加定位和穩定性。任一側到另一側或由前到後的控制。一般建議:兩端充洩閥為靠臀部處。
- 5.充氣完成後才可坐上去作軟硬度調整,參考【舒適度設定】。
- 6.檢查座墊是否平鋪於座椅或輪椅上, 若凹陷嚴重則需調整使臀部壓力平均分散功能。
- 7.建議於每十日內巡查一次座墊或視個別情況隨即調整舒適度。

【座墊圖示】

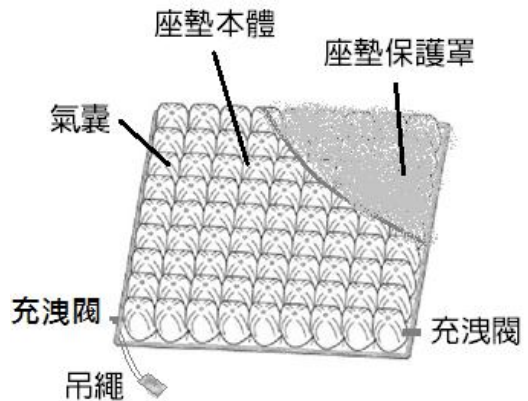


【產品內容物】

- 1.座墊本體及座墊保護罩。
- 2.說明書及修補用軟貼片。
- 3.手持打氣筒及軟管。。



【舒適度設定】

- 1.以逆時針方向旋轉充洩閥使其鬆開。此時座墊上面還不能坐。
- 2.將手持打氣筒上的軟管套接到充洩閥上面。確定進氣通道為密閉的狀態。
- 3.用手持打氣筒打氣於座墊直到略有硬度,輪流完成兩區充氣,以順時針方向關閉充洩閥。
- 4.此時使用者才能坐在座墊上。
- 5.將您手放於座墊和臀部的薦骨之間。
- 6.打開充洩閥慢慢開始一點一點釋放空氣,調整其舒適軟硬度。
注意:最軟只放到薦骨和座墊之間,至少手平放於中間不會觸底的距離以上之高度。
- 7.此座墊才真正完成設定。

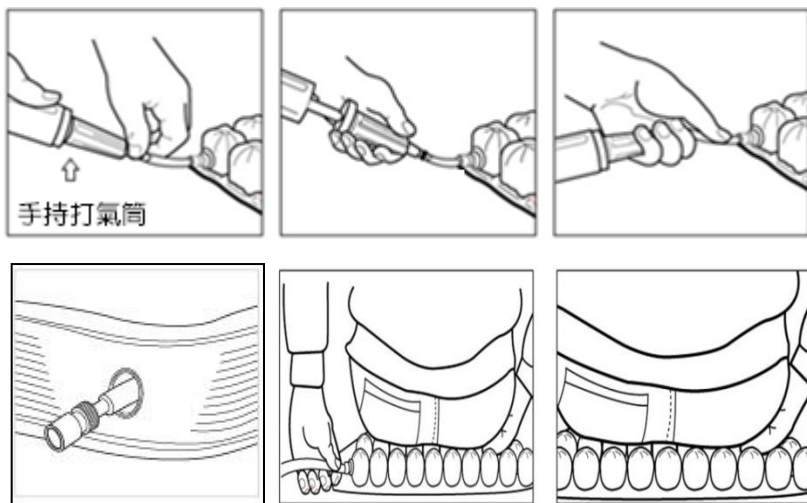

【清潔與洗滌說明】

◎ 座墊本體

- 1.當有些微髒污時,可使用乾淨濕布或軟毛刷及海棉擦拭髒的部份 ,
然後"自然晾乾"。
- 2.當有嚴重髒污時,請用溫水或抗菌肥皂水以手清洗方式洗淨。
然後"自然晾乾"。
- 3.使用吊繩側掛輔助晾乾。
- 4.水洗前請先確定將充氣閥鎖緊,以免進水。
- 5.請勿使用洗衣粉或其他溶劑。
- 6.請避免曝曬於陽光下及機器烘乾。

◎ 座墊保護罩

- 1.洗淨溫度在86°F (30°C) 以內。
請以手洗方式使用冷水及液態洗衣精清洗後, "吊掛自然晾乾"。
- 2.勿於洗衣機洗,勿烘乾,勿使用漂白劑及勿高溫高壓消毒。
- 3.建議您購買第二件座墊保護罩,以便於清潔交替使用。


【簡易修復】

如果座墊本體被意外刺穿的直徑小於2mm,

可使用手冊內附的簡易維修貼片作修復。

【如何修補】

- 1.先將小破孔處用微粗糙面乾淨布或75%酒精擦拭清潔修復處。
- 2.取下修補用的軟貼片。
- 3.於小破孔處向下按壓黏貼作修補。

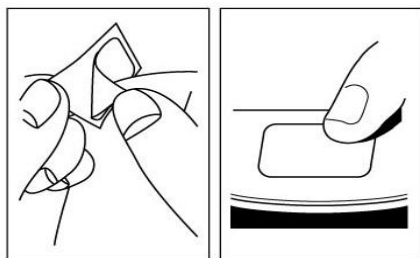

【儲存方式】

- 1.將氣墊座完全洩氣。
- 2.將座墊平鋪於原彩盒內收藏或裝入防塵袋安置於平坦處,並於乾燥處儲放。

【基本規格】

尺寸:

座寬x座深x高度

40*40*06cm (8*8兩區) ☐

45x40x06cm (9*8兩區) ☐

材質:

座墊本體: 塑膠 (PVC)

保護罩: 上罩為四向彈性透氣Nylon布 /

下罩為防滑防水阻燃PU貼合層

最大載重:130Kg

【保固期】

只保固座墊本體於購買後正常使用下之服務為期兩年。

保固條款:

本公司保固其產品零件或製作過程上人為的缺失，依據情況及條件限制，針對已證實之零件或製程中人為失誤的產品，以交換方式或提供維修的服務，本保固條款不涵蓋因意外事件、濫用、誤用、自然或人為災害、未授權之拆卸、維修或更改而對產品所造成的損害。

淳碩科技有限公司

【氣墊座補助-保固書】

淳碩(授) 第 V06-01 號

中華民國____年____月____日

藥商：淳碩科技有限公司

負責人：賴允能

統編: 12956351

衛部醫器輸壹字第 014760 號

地址: 231新北市新店區民權路130巷3號4樓

服務電話: 0800-820168



型號: 如下列

品名: PVC塑膠氣囊氣墊座

符合: 輪椅座墊- A款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質)補助

產品規格表:

型 號	尺 寸	高 度	氣囊數量	坐墊材質
TS-V06-4040	40*40cm	6cm (2.36英吋)	64顆 (8*8)	塑膠 (PVC)
TS-V06-4540	45*40cm	6cm (2.36英吋)	72顆 (9*8)	塑膠 (PVC)

【PVC塑膠氣囊氣墊座 保固卡】


購買型號:_____

序號S/N:_____

座墊本體保固期: 兩年

起: 中華民國_____年_____月_____日

迄: 中華民國_____年_____月_____日

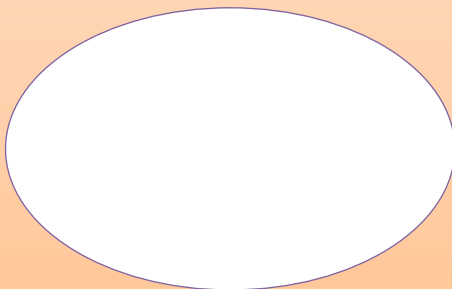

(經銷商蓋章)