

智能五行经络仪 LX-ZNWX4.0

产品安装使用说明书

长沙市灵心康复器材有限公司

产品实物图

智能五行经络仪

LX-ZNWX4.0



指夹无线采集仪 透气PU皮质 额定安全电压 5档速度调节

配置7.9英寸触摸式平板/无线腕表式生理指标采集仪/特配平板支架/音乐治疗指导书籍

六大功能特点：

- 1.C型手臂按摩气囊
- 2.无重力按摩技术
- 3.3D按摩模式
- 4.背部温热针灸理疗
- 5.美腿及拉伸膜式
- 6.坐垫气囊按摩模式



综述：

给人带来强烈的真实感，如同真人按摩手法一般，有更强的感知性，5档速度可调节，三级气压可调节，采用L型直行导轨、3D机械手曲轨按摩、肩部按摩方式：肩部气囊按摩、臀部按摩方式：震动及气囊夹臀按摩、脚底按摩方式：滚轮式按摩，按摩手法：揉捏 指压 推拿 叩击 拍打 拉伸，可以更好的达到全身心放松的效果。在1.0的基础上增加了音乐反馈系统，指脉生理传感器，专业指脉式脉搏指数、压力指数，HRV生理指标采集监控器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器以及数据传输线。系统简介运用国际一流的生物反馈和心理调适技术研制的，集生理指标监控、情绪评估、身心状态调节、情绪稳定性训练为一体的智能系统。使用本系统能够帮助改善紧张、焦虑等不良情绪，增加积极情绪，保持良好的学习状态。

安装说明：

一、智能五行经络仪后方，插入电源线连接电源。

二、遥控器另一端电源线插入放松椅后下方，正常连接使用。


三、将 7.9 英寸平板电脑固定在平板支架上，打开电源，打开蓝牙链接放松椅。

四、遥控器操作内容：


1、有 A、B、C 三种模式自由选择

2、根据遥控器的文字选项部分，选取需要体验的功能。

五、平板内音乐反馈系统的使用

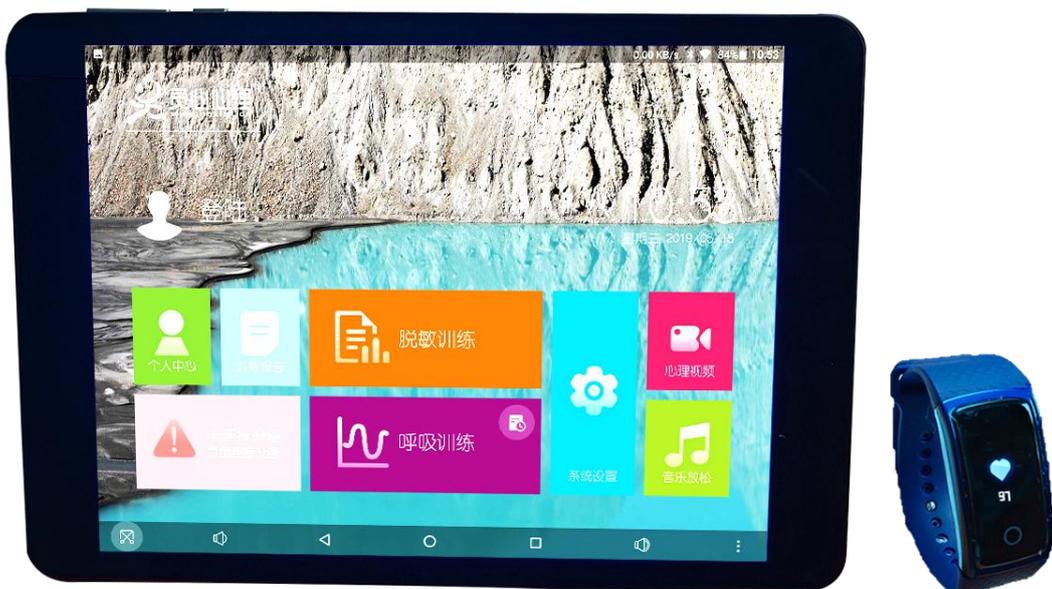


1、双击桌面智能音乐反馈系统图标进入系统，系统首页界面如下图

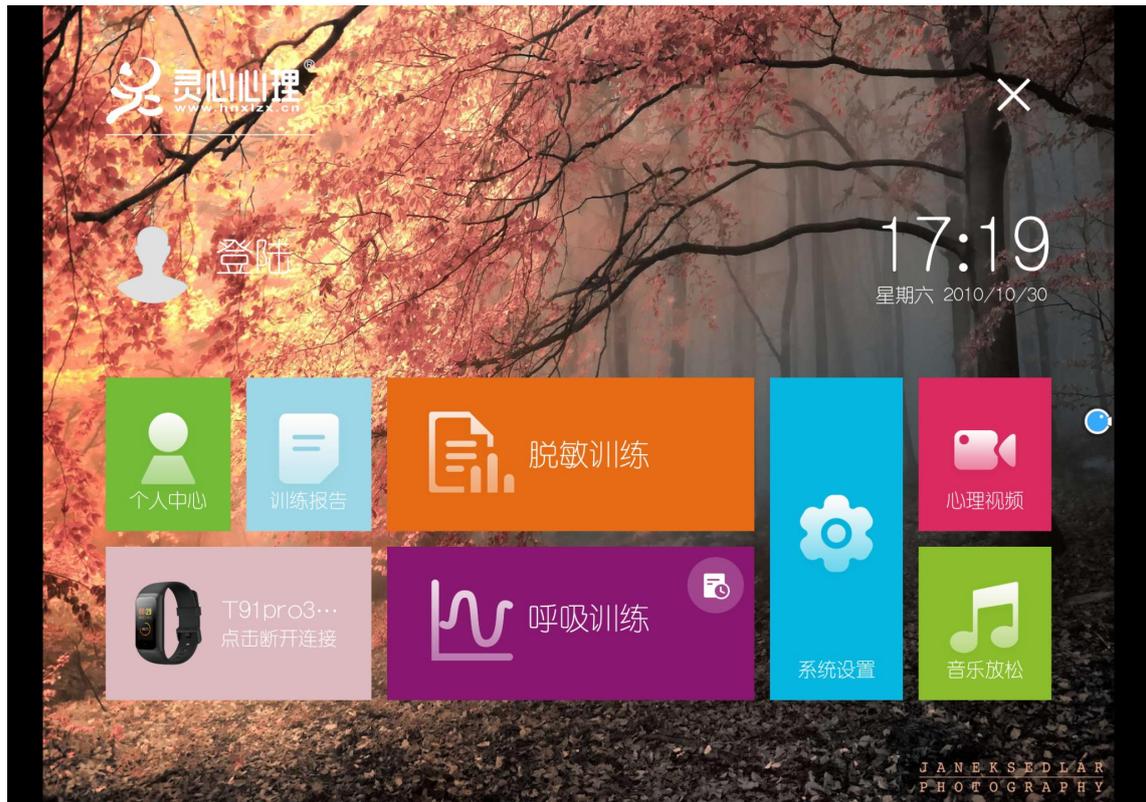


2、点击首页界面上登录如下图所示




3、进入登录界面默认超级管理员账号 admin 和密码 admin 登录，或者自行注册登录

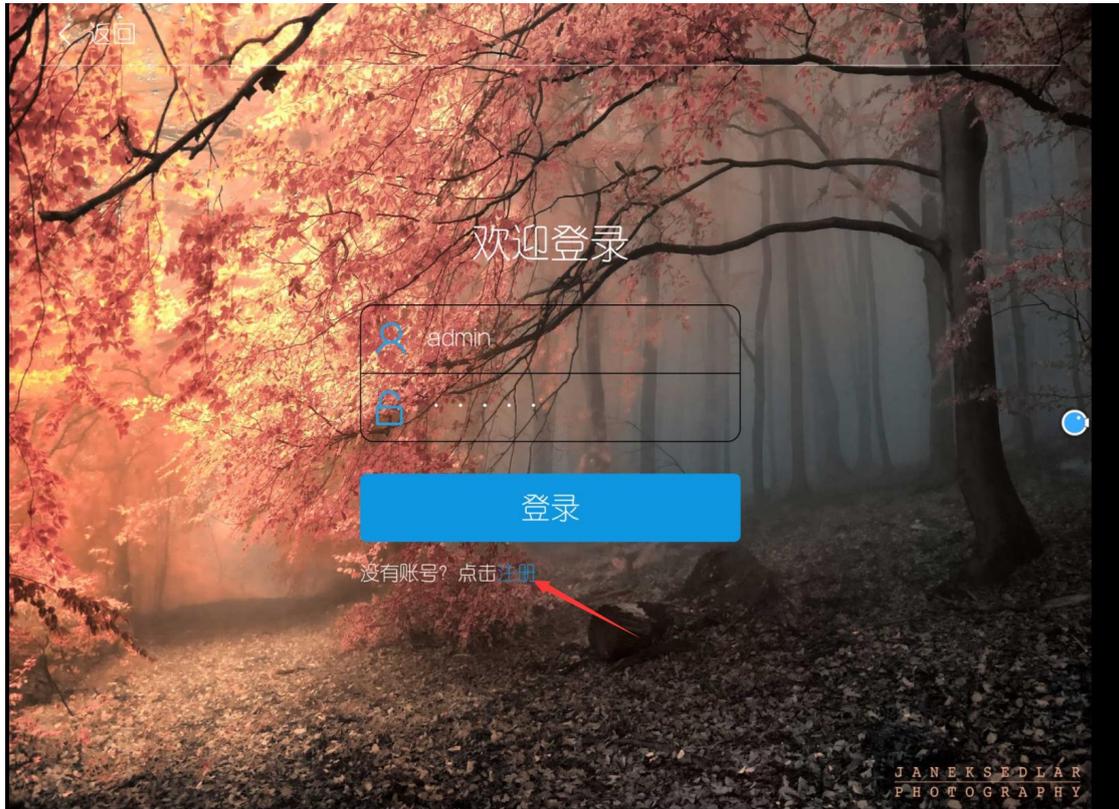

3.1 注册

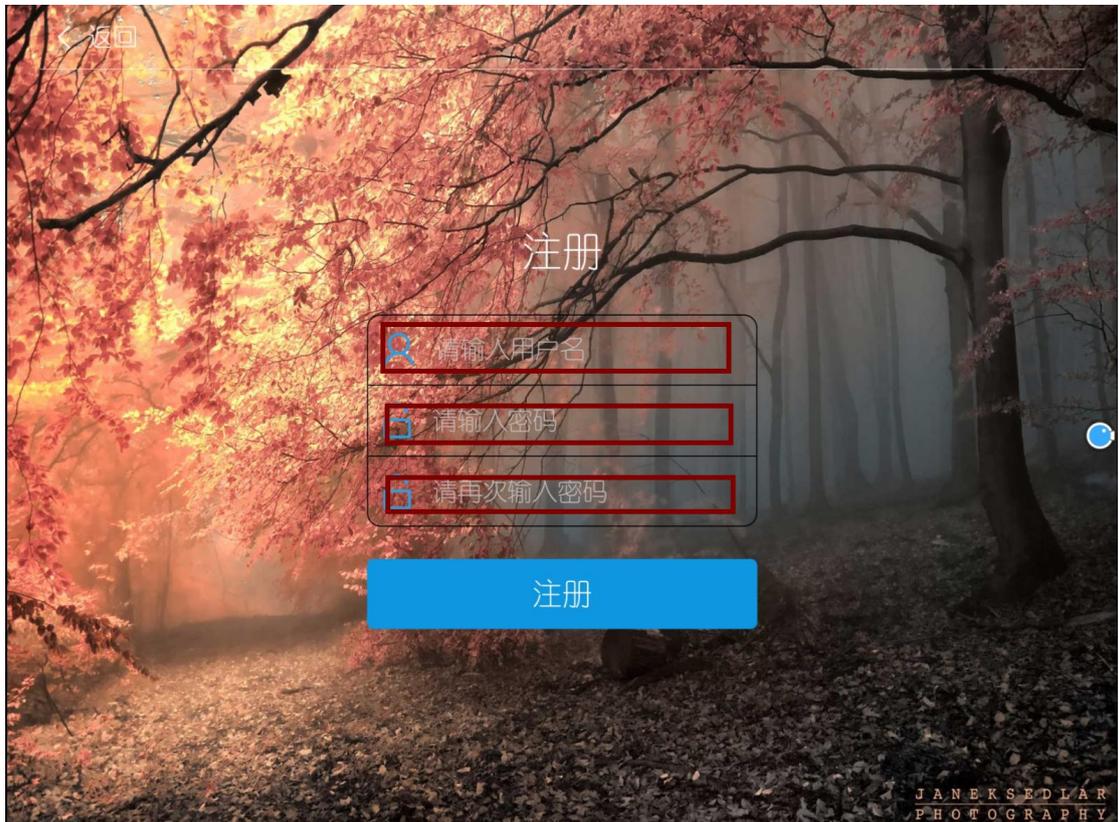


3.2 填写好信息提交，超级管理员也可批量导入使用用户，系统内部有导入格式格式模板，自行填信息后批量导入。

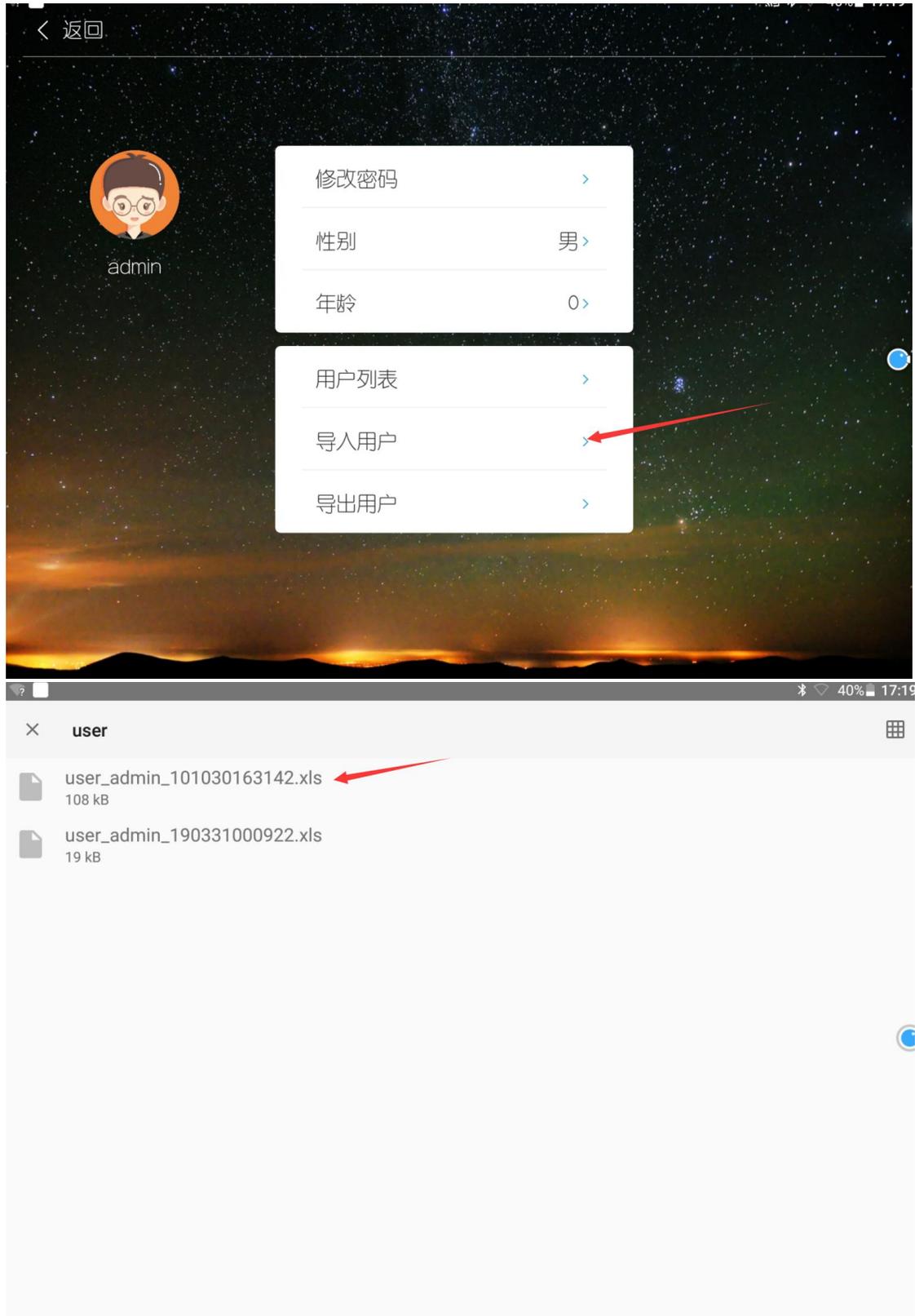


导入成功即可查看用户列表


用户名	性别	年龄	角色
admin	男	0	管理员
2	男	3	普通用户
3	男	4	普通用户
4	男	5	普通用户
5	男	6	普通用户
6	男	7	普通用户
7	男	8	普通用户
8	男	9	普通用户
9	男	10	普通用户
10	男	11	普通用户
11	男	12	普通用户
12	男	13	普通用户
13	男	14	普通用户
14	男	15	普通用户
15	男	16	普通用户
16	男	17	普通用户

4、佩戴好无线蓝牙手环，点击系统界面右下角进行蓝牙搜索匹配

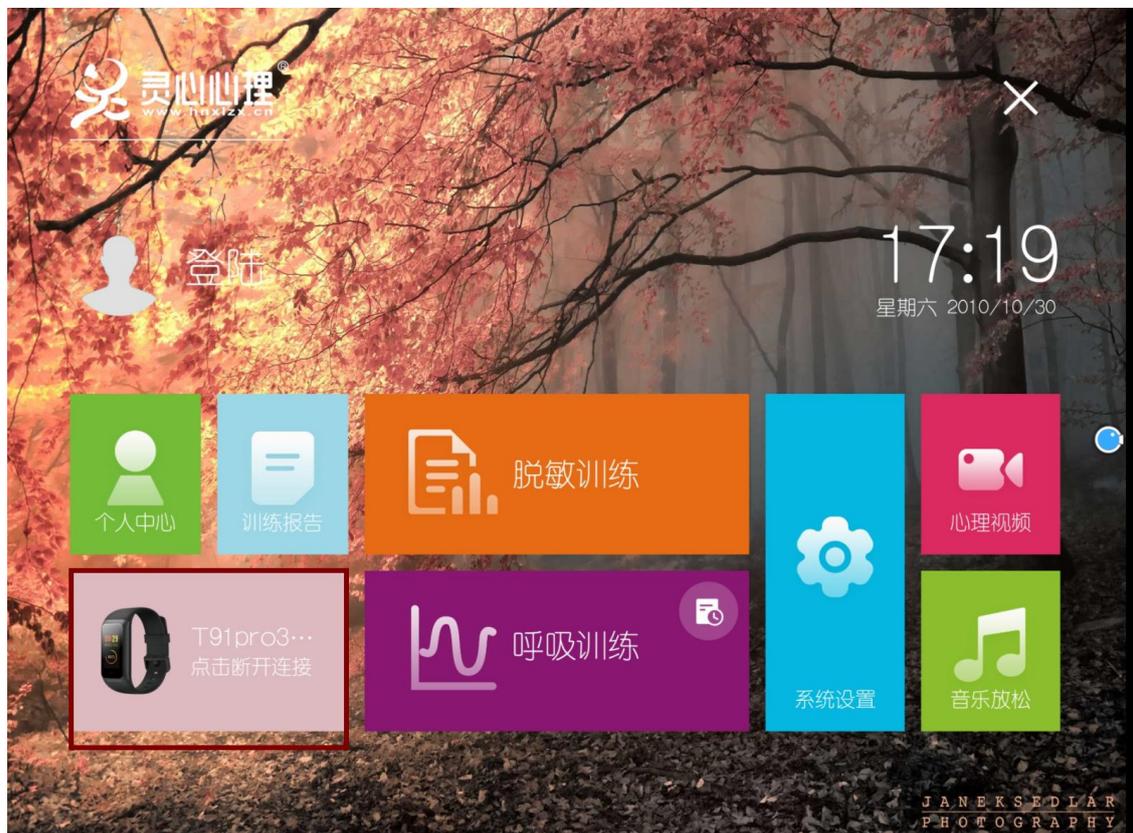

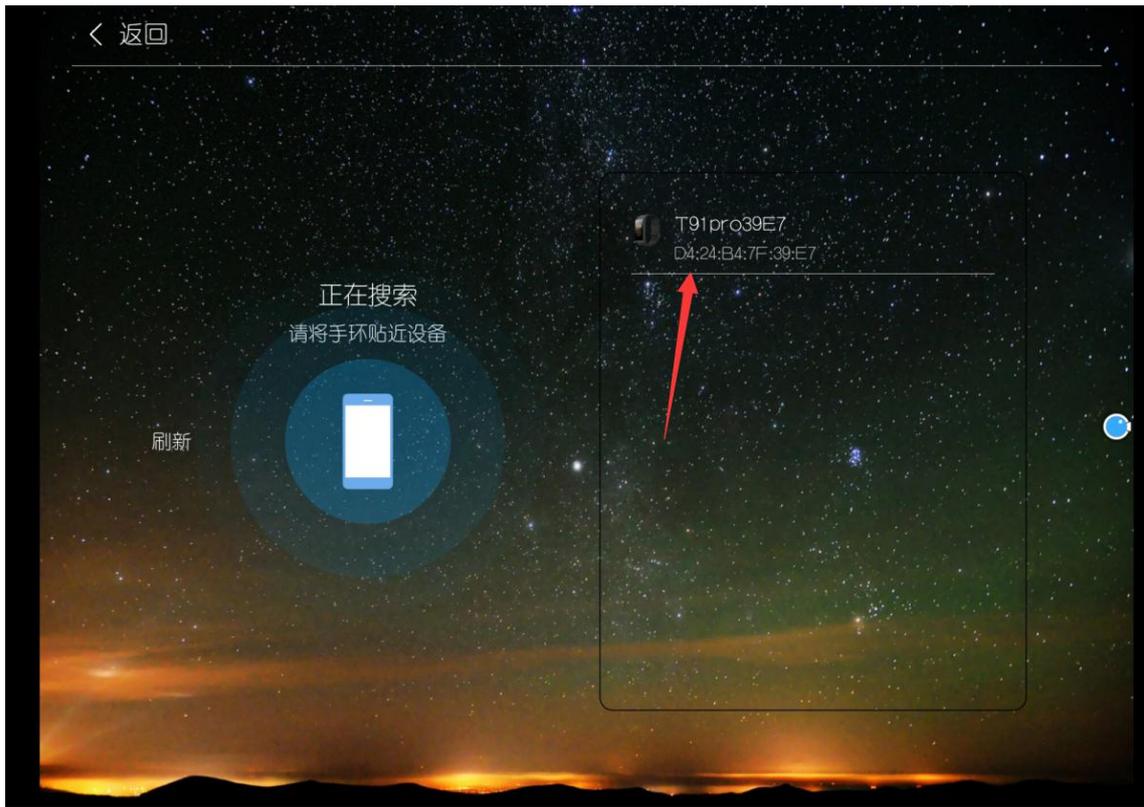

5、蓝牙链接成功即可开始脱敏训练


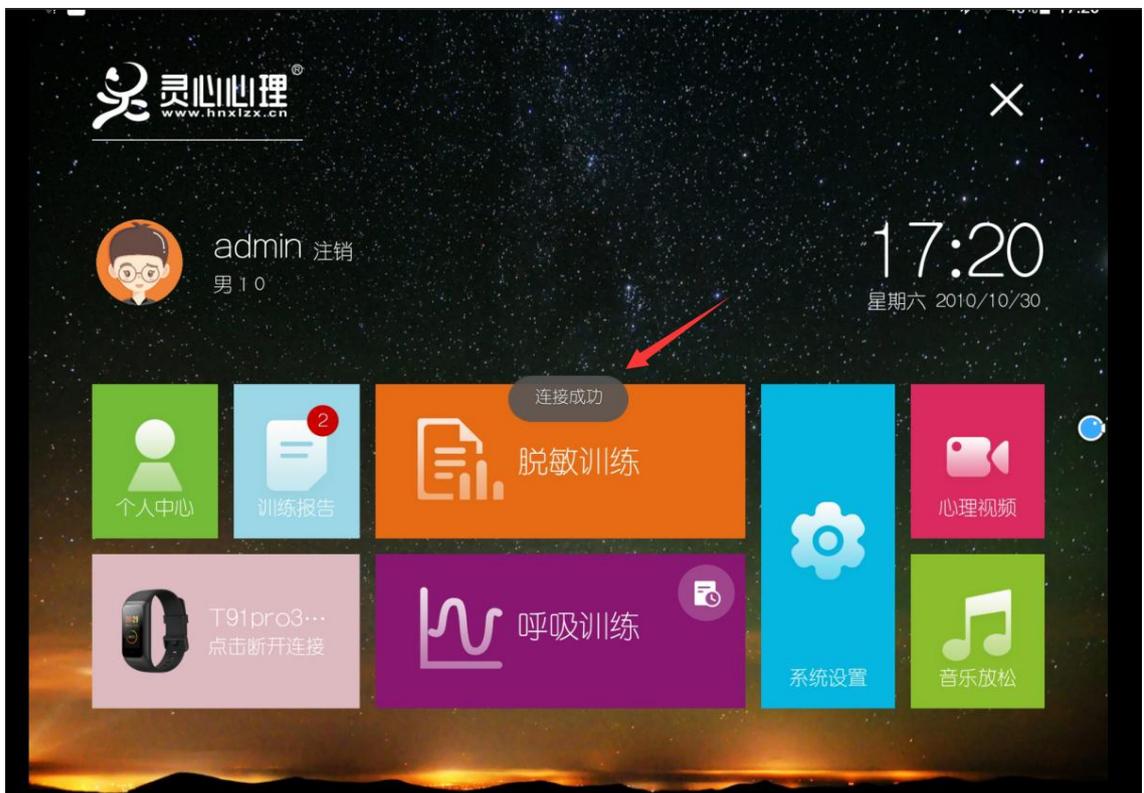





6、设置训练指数，一般通用设置值在 60-70 区间



7、设置完成开始训练

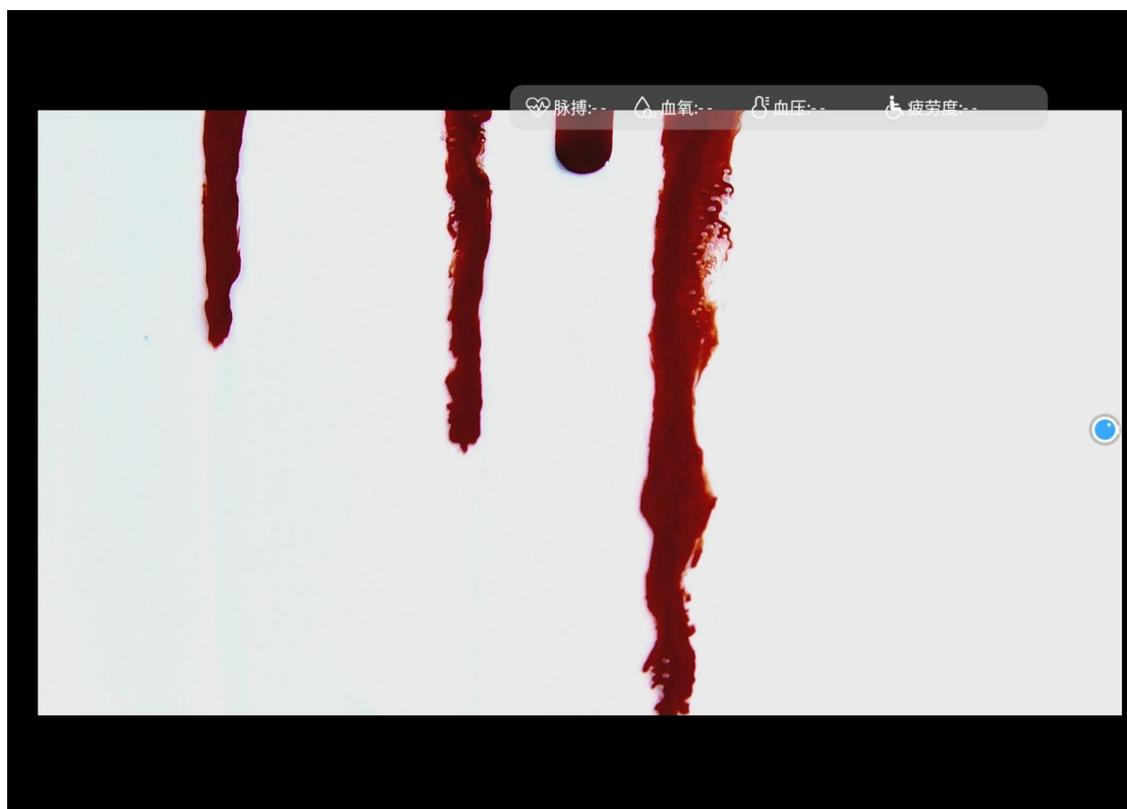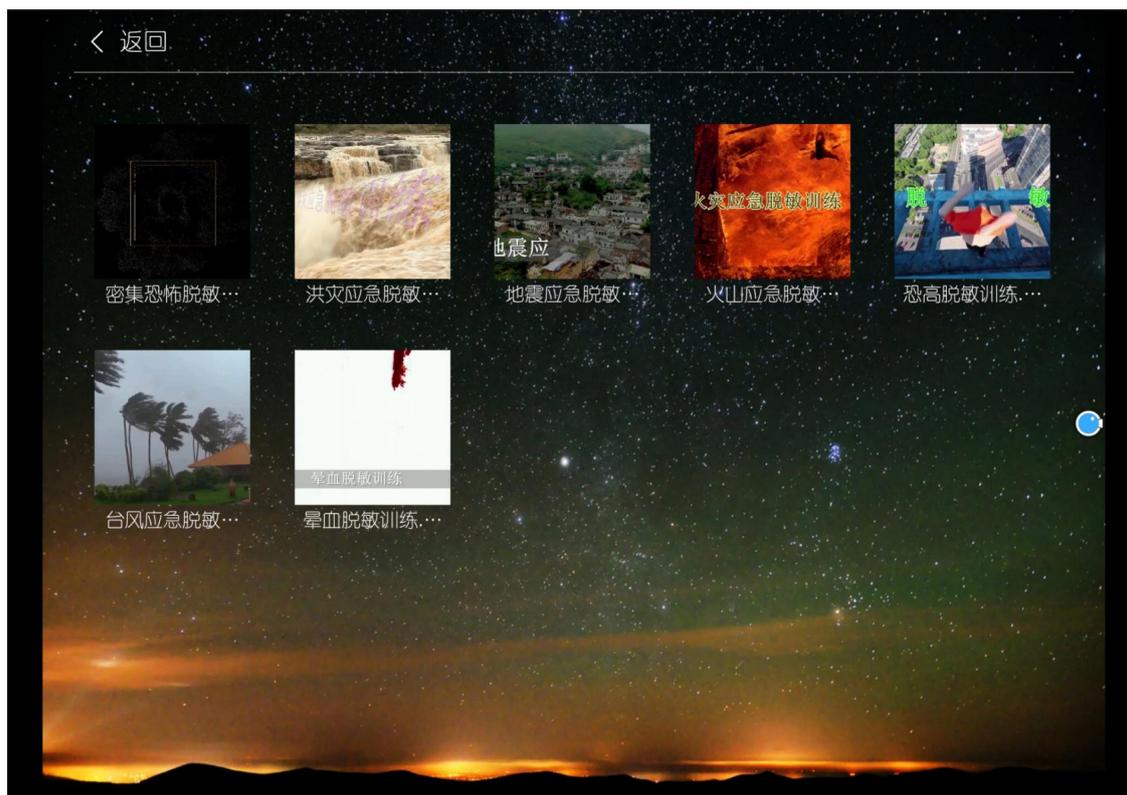

8、当训练过程中体验者 HRV 波动较大系统会自动干预，自动转换界面并播放舒缓音乐

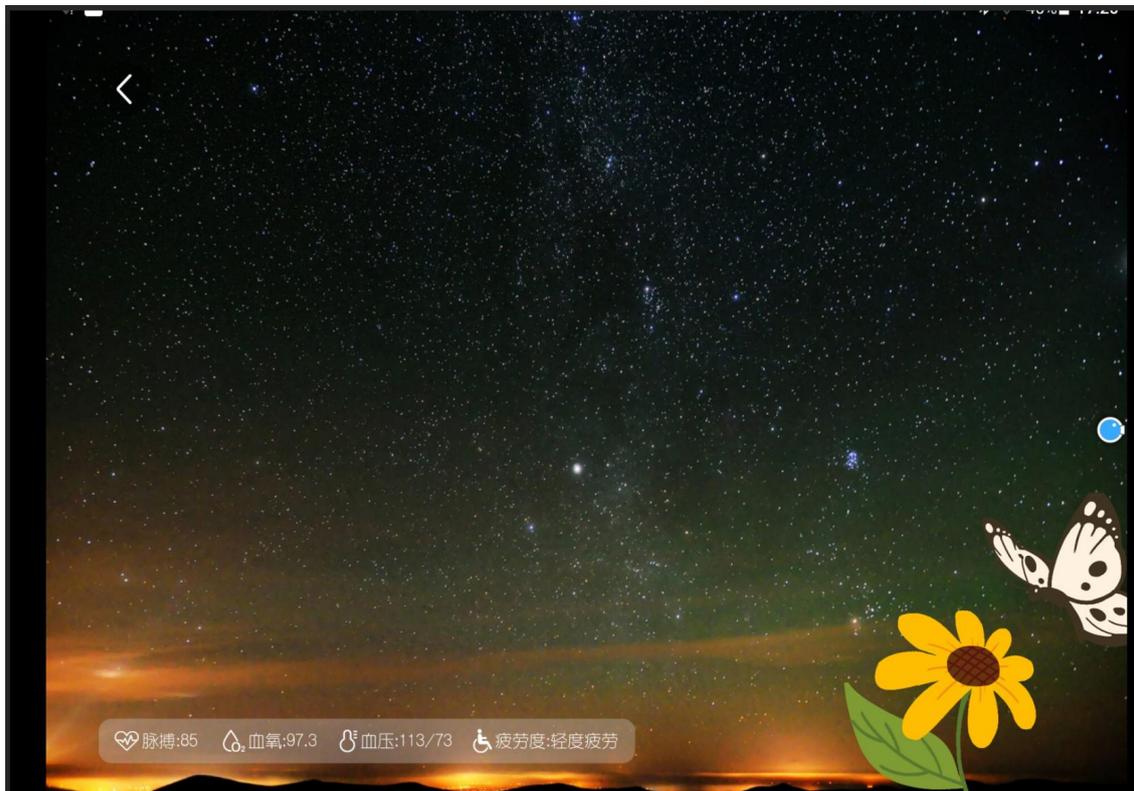

9、呼吸训练（多种时间与频率搭配选择）





9.1、选择背景音乐



9.2、跟随呼吸球节奏进行呼吸训练，呼吸球向下代表呼气，向上代表吸气




10、训练完成查看报告


返回 报告详情 曲线图 导入报告 导出报告


项目:呼吸训练 心理预期最大值: 无 训练时长: 15:00 呼吸频率: 低频

心率	脉搏	血氧	收缩压	舒张压	疲劳度	采样时刻
0	0	0.0	0	0	非常疲劳	10-10-30 16:09:46
0	0	0.0	0	0	非常疲劳	10-10-30 16:09:56
99	99	99.2	116	75	轻度疲劳	10-10-30 16:10:06
88	88	99.7	116	76	轻度疲劳	10-10-30 16:10:16
86	86	99.7	120	80	轻度疲劳	10-10-30 16:10:26
85	85	97.3	114	74	轻度疲劳	10-10-30 16:10:36
91	91	98.9	114	76	轻度疲劳	10-10-30 16:10:46
97	97	97.8	115	76	轻度疲劳	10-10-30 16:10:56
91	91	97.4	114	73	轻度疲劳	10-10-30

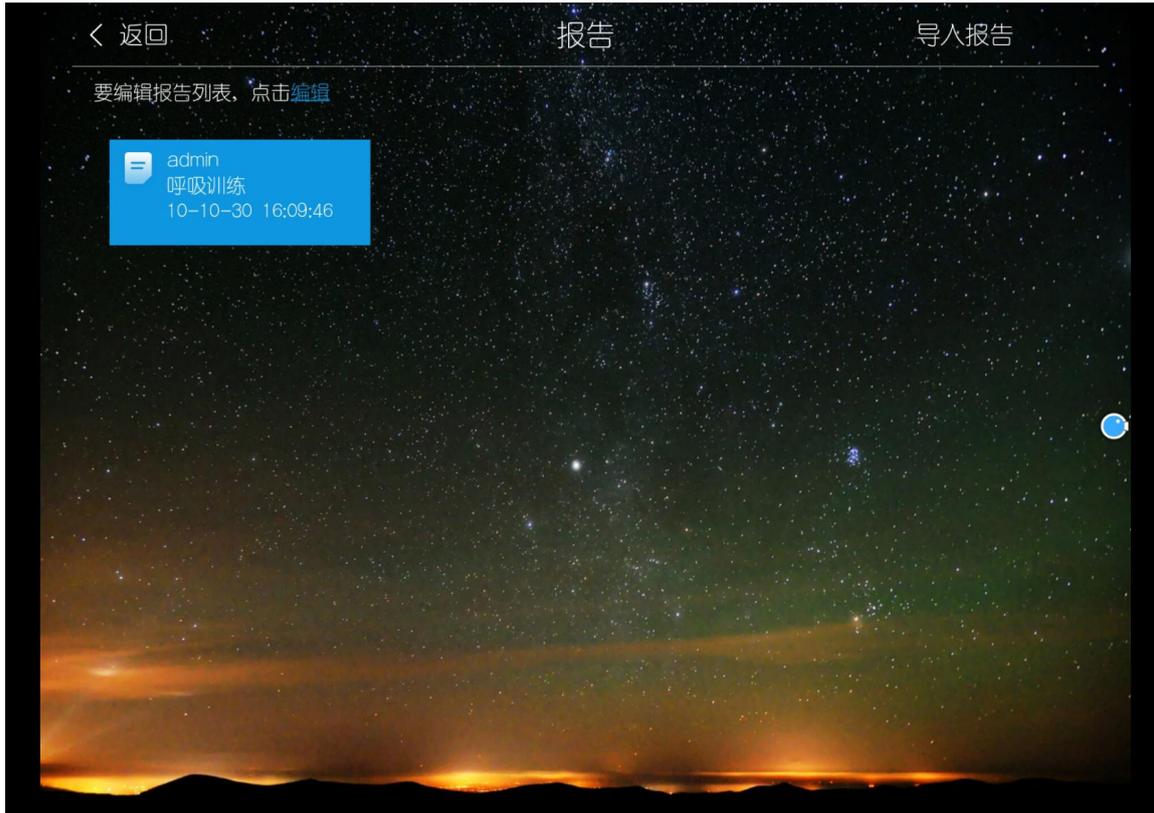



11、报告导出导入


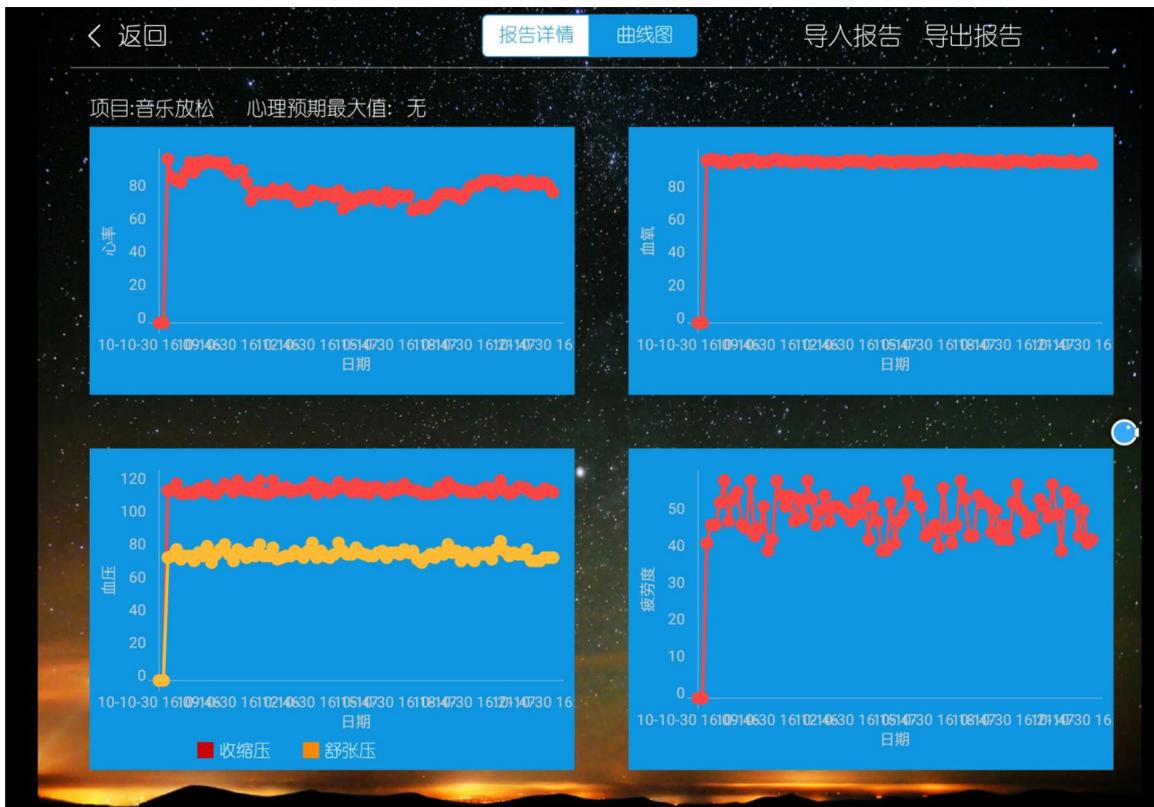


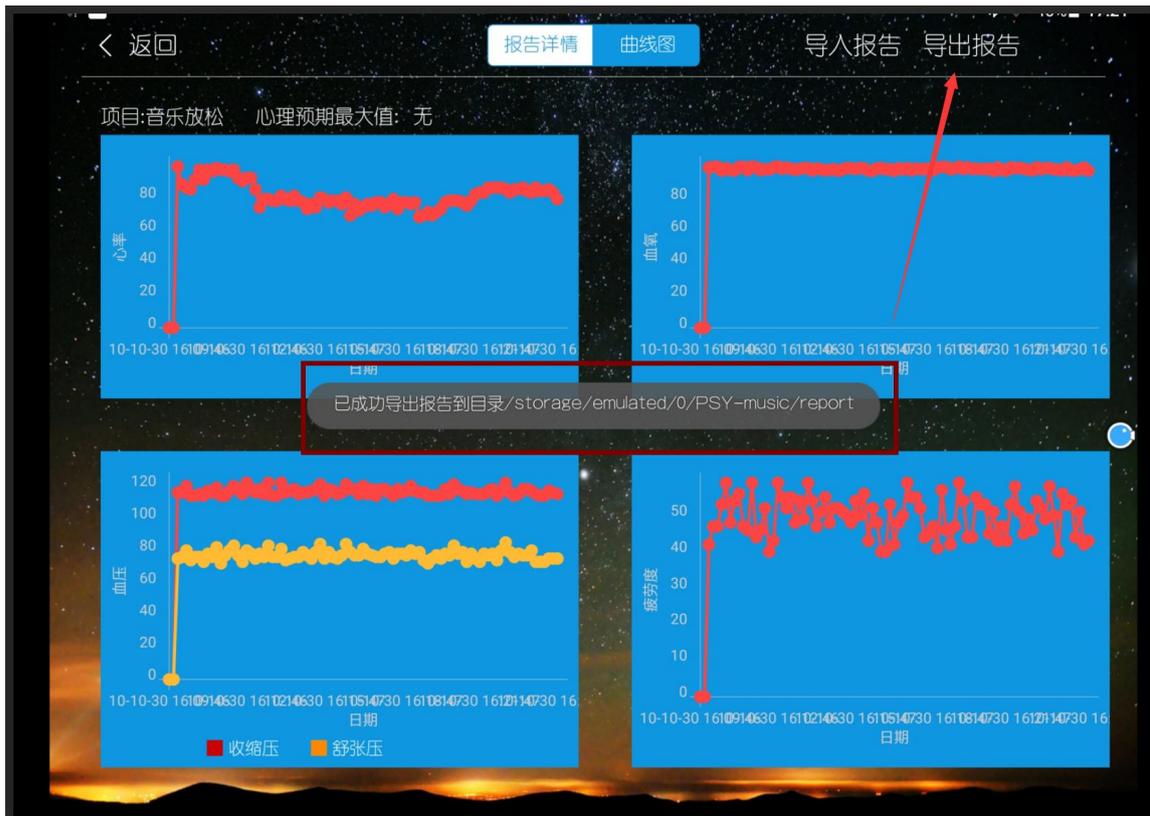


12、系统设置，包含背景设置；获取帮助；关于我们



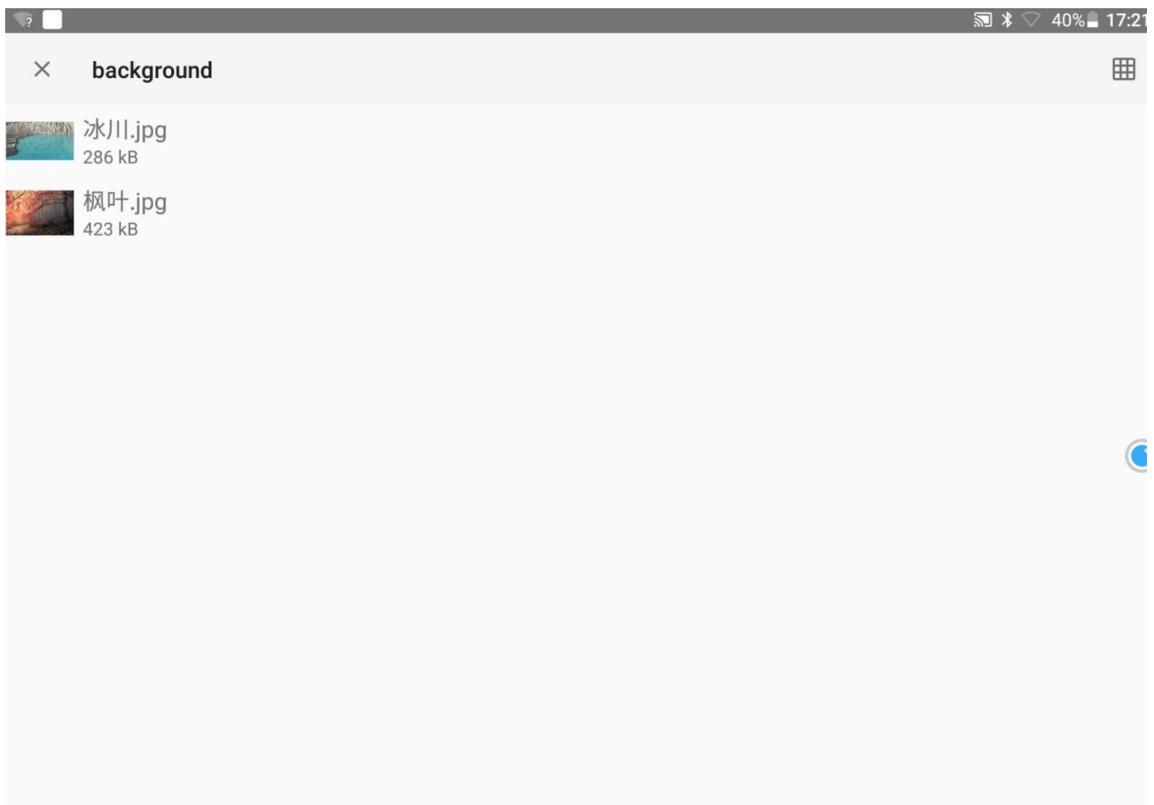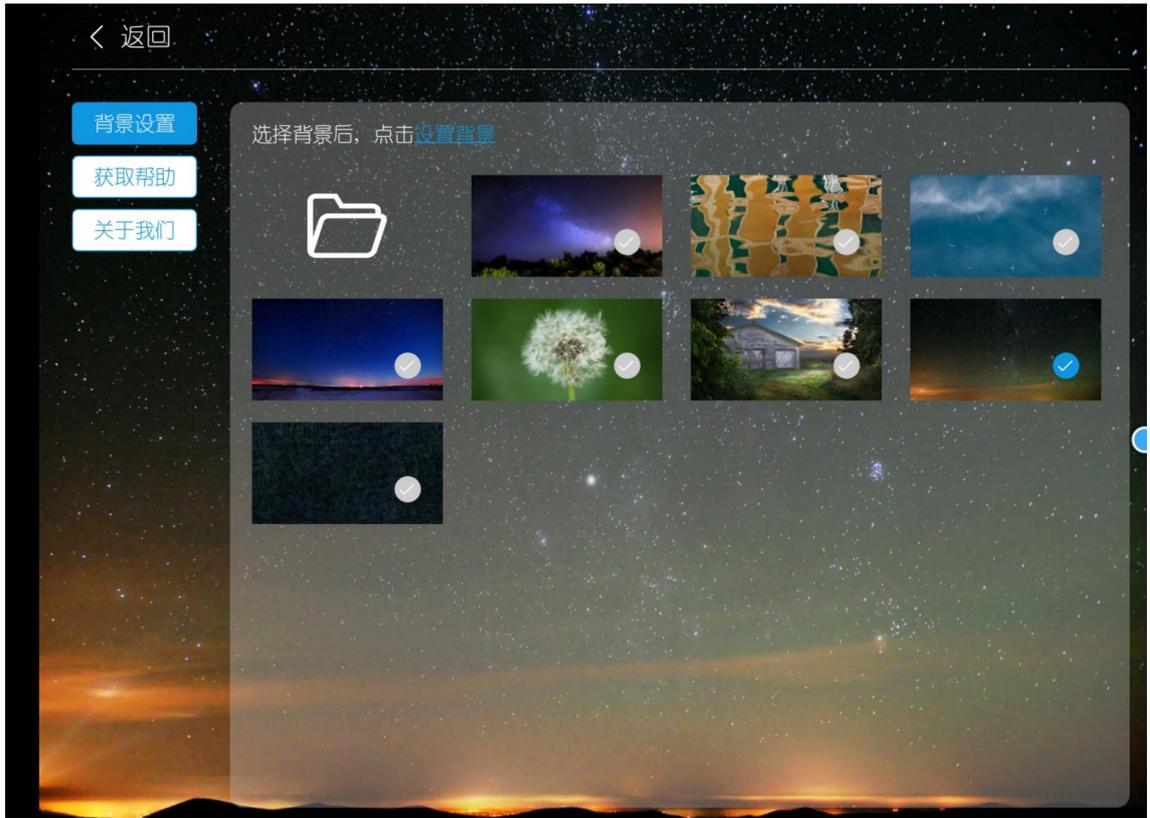

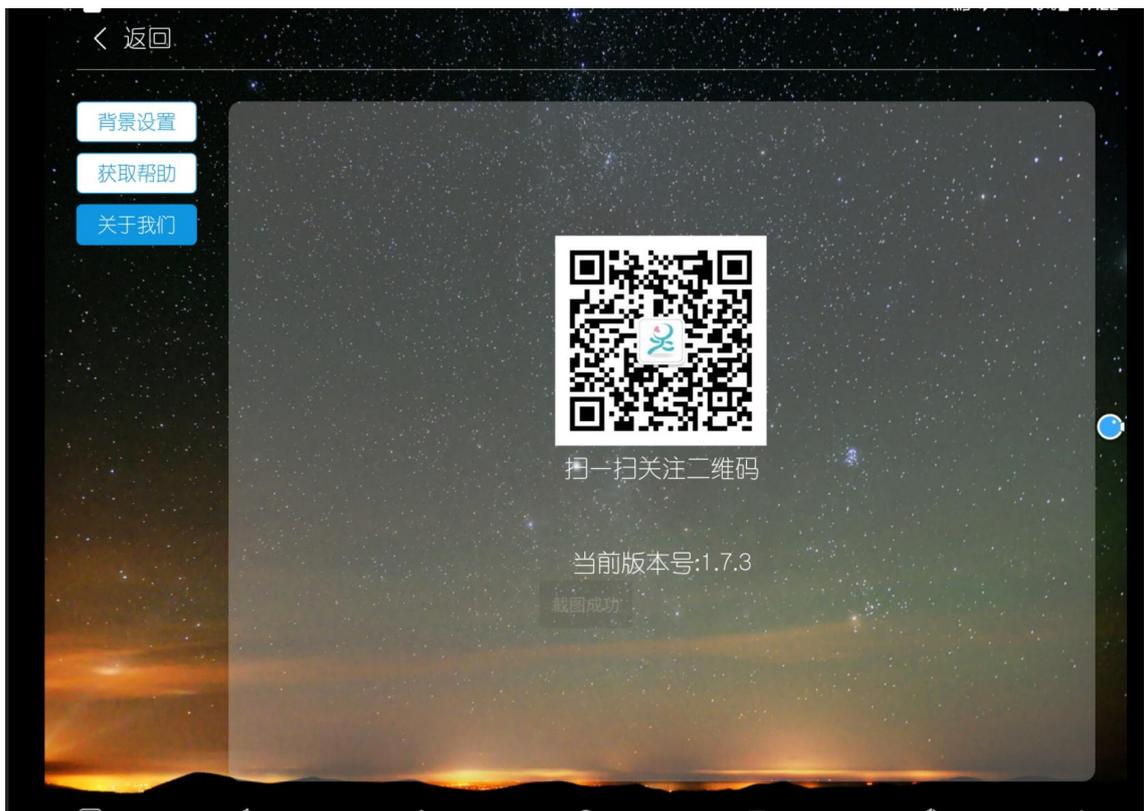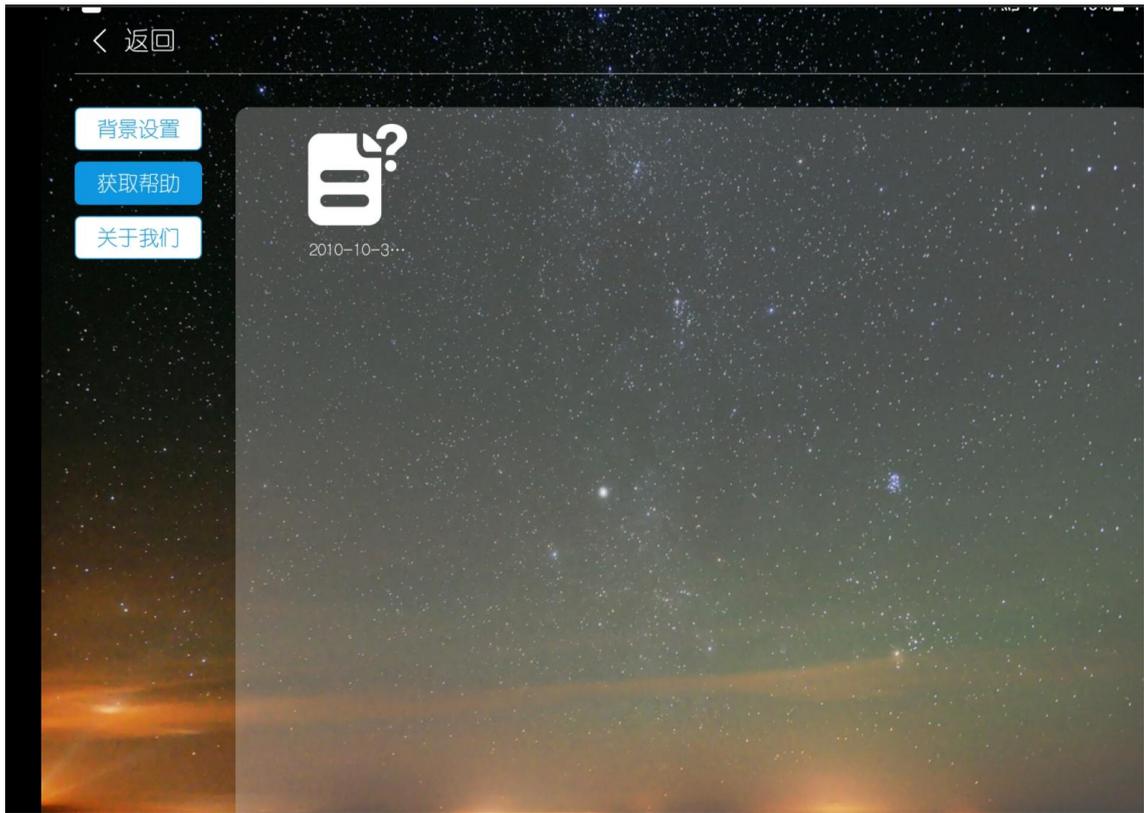


13、心理品质提升视频与放松训练指导视频

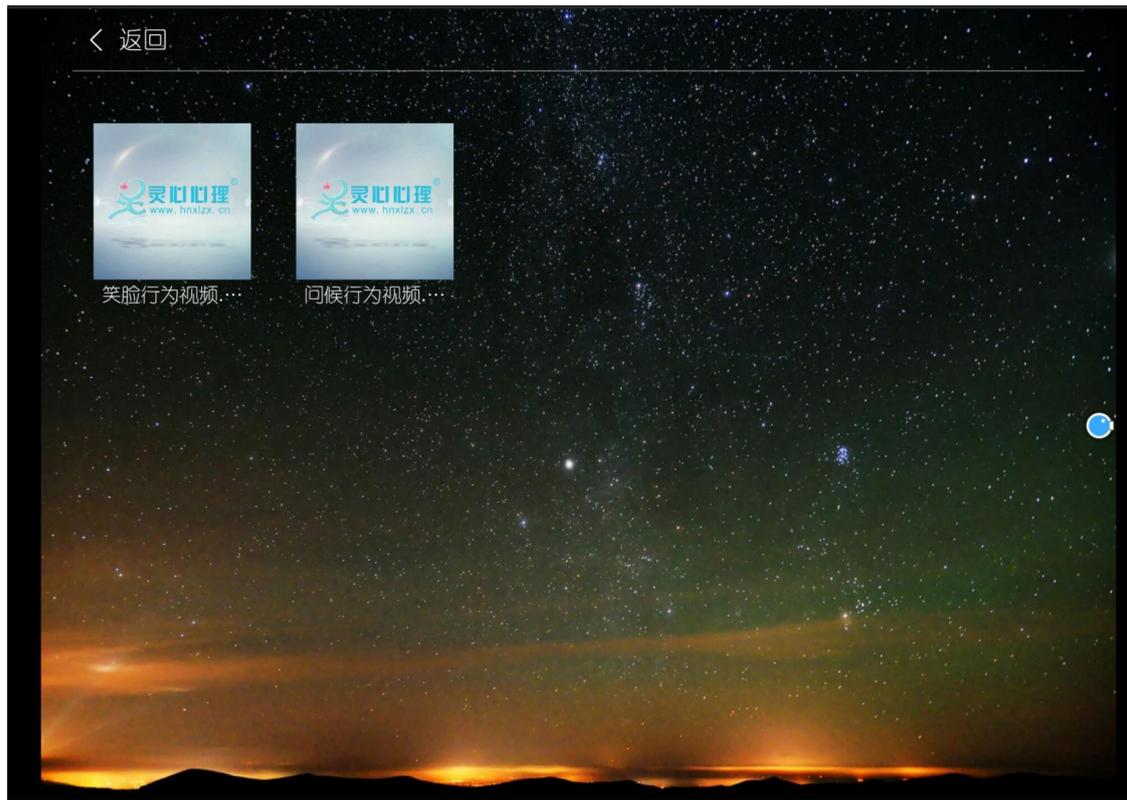

14、音乐放松多种类型音乐选取



15、生成报告

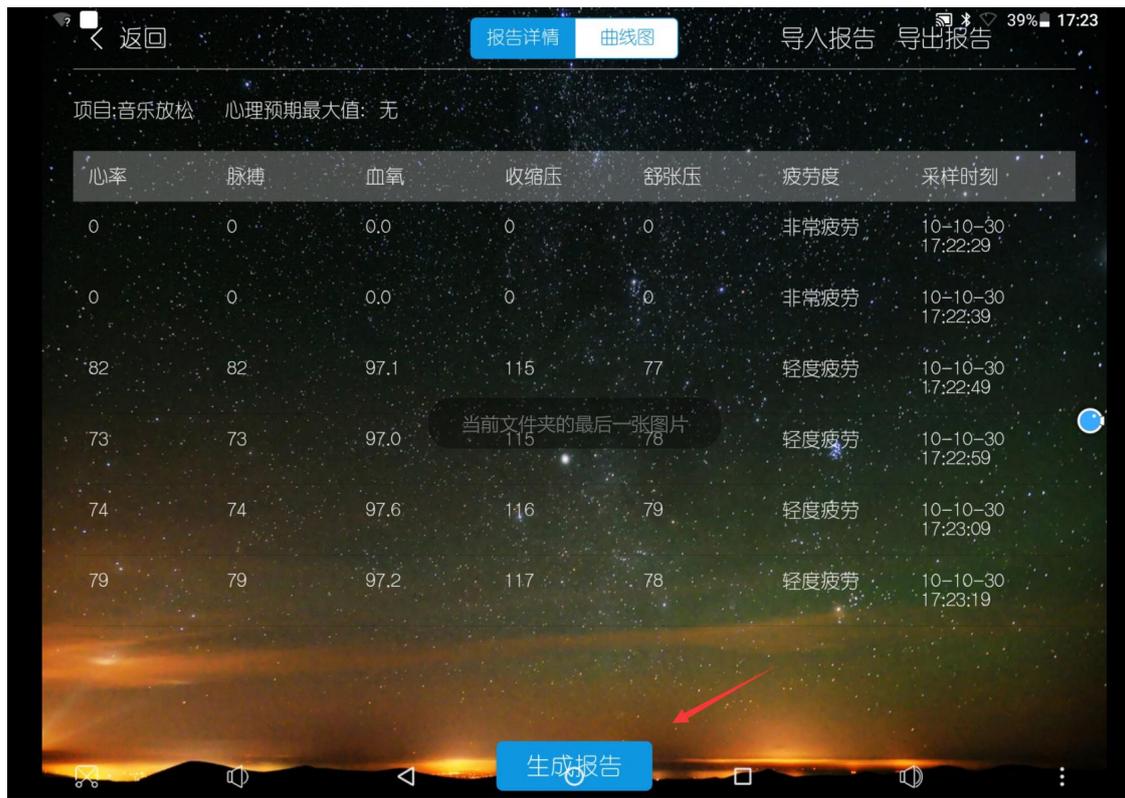

六、调整平板直架于自己使用舒适的的角度，开始体验放松吧。



长沙市灵心康复器材有限公司

售后联系电话: 0731-89824589

地址: 长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 3 栋 204

网址: www.hnxyz.cn